

URIC ACID LIQUICOLOR
ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10689	50	166
10687	100	333
10688	250	833
10690	120	400
10691	400	1333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	505
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	6
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	0
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	20.0
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	AU
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Branco	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

ALBUMINA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
001	500	1250
001-P	250	625
001-E	1000	2500

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	660
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	400
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	0
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	6.0
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	ALB
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Branco	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

α AMILASE

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
024	30	100	026	80	266
024A	30	100	026A	80	266
025	60	200	027	120	400
025A	60	200	028	300	1000

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	405
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Cinético
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	120
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	7000
Consumo	

Referência	Fator
Fator	10183
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	AMI
Decimais	0
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Não Aplicável	

Diluição	1:1
-----------------	-----

Dil. Próprio	Não
---------------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

BILIRRUBINA DIRETA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10740	109	500

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	550
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	20
Reagente 1	200
Reagente 2	8

Tempos (seg)	
Segundo reagente	120
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	25.0
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	BILD
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Mistura Adicional	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

BILIRRUBINA TOTAL

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10740	109	500

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	550
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	20
Reagente 1	200
Reagente 2	8

Tempos (seg)	
Segundo reagente	300
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	25.0
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	BILT
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Mistura Adicional	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

CÁLCIO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
004	200	666
004-P	100	333
004-E	400	1333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	550
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	0
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	25.0
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	CA
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Branco	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

CK-MB NAC-act. LIQUIUV

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12118	100	333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	340
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Cinético
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	15
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	480
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	1300
Consumo	

Referência	Fator
Fator	6666
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	CKMB
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Não Aplicável	

Diluição	1:1
-----------------	-----

Dil. Próprio	Não
---------------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

CK-NAC ACTIVATED LIQUIUV

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12015	100	333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	340
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Cinético
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	7
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	1300
Consumo	

Referência	Fator
Fator	6508
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Intersecção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	CPK
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Não Aplicável	

Diluição	1:1
-----------------	-----

Dil. Próprio	Não
---------------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

**CHOLESTEROL LIQUICOLOR
COLESTEROL ENZIMÁTICO**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10016	100	333
10013	200	666
10014	500	1666
10017	120	400
10028	400	1333
10019	750	2500

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	505
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	540
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	COL
Decimais	0
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Branco	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

COLESTEROL HDL DIRETO
COLESTEROL HDL DIRETO SP

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10083	40	133
10084	80	266
10085	160	533
10086	240	800
10083SP	40	133
10084SP	80	266
10085SP	160	533
10086SP	240	800

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	590
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	225
Reagente 2	75

Tempos (seg)	
Segundo reagente	300
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	150
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
------------	---------------

Direção da Reação	Crescente
-------------------	-----------

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	HDL
Decimais	0
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Mistura Adicional	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

LDL CHOLESTEROL LIQUICOLOR
COLESTEROL LDL DIRETO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10094	80	266
10094-P	40	133
10094-E	160	533

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	590
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	225
Reagente 2	75

Tempos (seg)	
Segundo reagente	300
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	1000
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão

Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	LDL
Decimais	0
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Mistura Adicional	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

FÓSFORO UV

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10027N	200	666
10027N-P	100	333
10027N-E	400	1333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	340
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	120
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	30
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	FOSF
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Branco	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

**GLUCOSE LIQUICOLOR
GLICOSE ENZIMÁTICA**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10263	250	833
10261	500	1666
10262	1000	3333
10260	400	1333
10121	1000	3333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	505
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	400
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
------------	---------------

Direção da Reação	Crescente
-------------------	-----------

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	GLI
Decimais	0
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Branco	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

γ-GT LIQUICOLOR

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12013	100	
12023	400	
12213	80	
12033	1000	
12043	60	
12013	100	

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	405
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Cinético
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	30
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	120
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	230
Consumo	

Referência	Fator
Fator	1158
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	GGT
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Não Aplicável	

Diluição	1:1
-----------------	-----

Dil. Próprio	Não
---------------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

GOT (ASAT) IFCC mod.

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12011	100	333
12031	1000	3333
12211	80	266
12021	400	1333
12300	60	200
12301	100	333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	340
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Cinético
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	30
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	120
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	300
Consumo	

Referência	Fator
Fator	1745
Direção da Reação	Decrescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	GOT
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Não Aplicável	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

GPT (ALAT) IFCC mod.

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
12012	100	333
12212	80	266
12401	60	200
12402	100	333
12022	400	1333
12032	1000	3333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	340
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Cinético
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	30
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	120
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	300
Consumo	

Referência	Fator
Fator	1745
Direção da Reação	Decrescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Intersecção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	GPT
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Não Aplicável	

Diluição	1:1
-----------------	-----

Dil. Próprio	Não
---------------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

TRIGLICERIDES LIQUICOLOR^{mono}
TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10724	400	1333
10725	750	2500
10726	100	333
10727	200	666
10728	400	1333

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	505
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	1000
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão

Direção da Reação	
	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	TRI
Decimais	0
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Branco	

Diluição	
	1:1

Dil. Próprio	
	Não

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

URÉIA LIQUIUV

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10521-P	150	500
10521-M	300	1000
10521-X	75	250
10521-E	600	2000
10521	500	1666

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	340
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Cinético
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	3
Reagente 1	300
Reagente 2	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	
Incubação	90
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	300
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
-------------------	---------------

Direção da Reação	Decrescente
--------------------------	-------------

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	URE
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Não Aplicável	

Diluição	1:1
-----------------	-----

Dil. Próprio	Não
---------------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

CRP
PROTEÍNA "C" REATIVA TURBIDIMÉTRICA

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES	CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11241	110	333	11241-T	330	999
11241-P	55	166	11141-SP	110	333
11241-M	220	666	11141-SPP	55	166

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	340
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	15
Reagente 1	300
Reagente 2	30

Tempos (seg)	
Segundo reagente	30
Incubação	180
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	25
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão

Direção da Reação	
	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	PCR
Decimais	1
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Mistura Adicional	

Diluição	
	1:1

Dil. Próprio	
	Não

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

CRP HS
PROTEÍNA "C" REATIVA ULTRA-SENSÍVEL

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
11541	41	132

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	340
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	12
Reagente 1	250
Reagente 2	50

Tempos (seg)	
Segundo reagente	180
Incubação	300
Intervalo	0

Limites	
Mínimo	
Máximo	230
Consumo	

Referência	Fator/ Padrão
Direção da Reação	Crescente

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Nome	PCRhs
Decimais	2
Temperatura	37

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Mistura Adicional	

Diluição	1:1
----------	-----

Dil. Próprio	Não
--------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

**HbA1c% LIQUIDIRECT
GLICOHEMOGLOBINA AUTOMAÇÃO**

CAT.	VOLUME (mL)	Nº. TESTES
10770	40	120

Definições

Comprimento de Onda (nm)	
Principal	660
Bicromática	

Valores de Referência (%)		
	Mínimo	Máximo
Homen	*	*
Mulher	*	*

Tipo	Ponto Final
Intervalo de Calibração	*

Volume (µL)	
Amostra	7
Reagente 1	250
Reagente 2	83

Limites	
Mínimo	2.0
Máximo	16.0
Consumo	

Tempos (seg)	
Segundo reagente	300
Incubação	300
Intervalo	0

Referência	Curva
-------------------	-------

Direção da Reação	Crescente
--------------------------	-----------

Detalhes

Cálculo	
Inclinação	1
Interseção	0
Nome	HbA1c
Decimais	1
Temperatura	37

Absorbância Inicial	
Min.	-0.100
Max.	3.000

Cálculo do Fator	
Substituição	

Vol. Descarte (µL)	
Reagente 1	0
Reagente 2	0

Reativos	
Mistura Adicional	

Diluição	1:1
-----------------	-----

Dil. Próprio	Não
---------------------	-----

O laboratório deverá validar a programação fornecida.

Ler a instrução de uso do produto para informações a respeito da metodologia, reagentes, amostras.

* Parâmetro definido pelo operador.

É recomendada a utilização do Control Set HbA1c% (CBA e CBN).

Calibrar o teste utilizando Calibrador Set HbA1c% Cat. 10776. Programar uma curva de calibração de 5 pontos:

Ponto 1 – Reagente Branco

Ponto 2 – Cal 1

Ponto 3 – Cal 2

Ponto 4 – Cal 3

Ponto 5 – Cal 4